

A


B

C

D

E


F

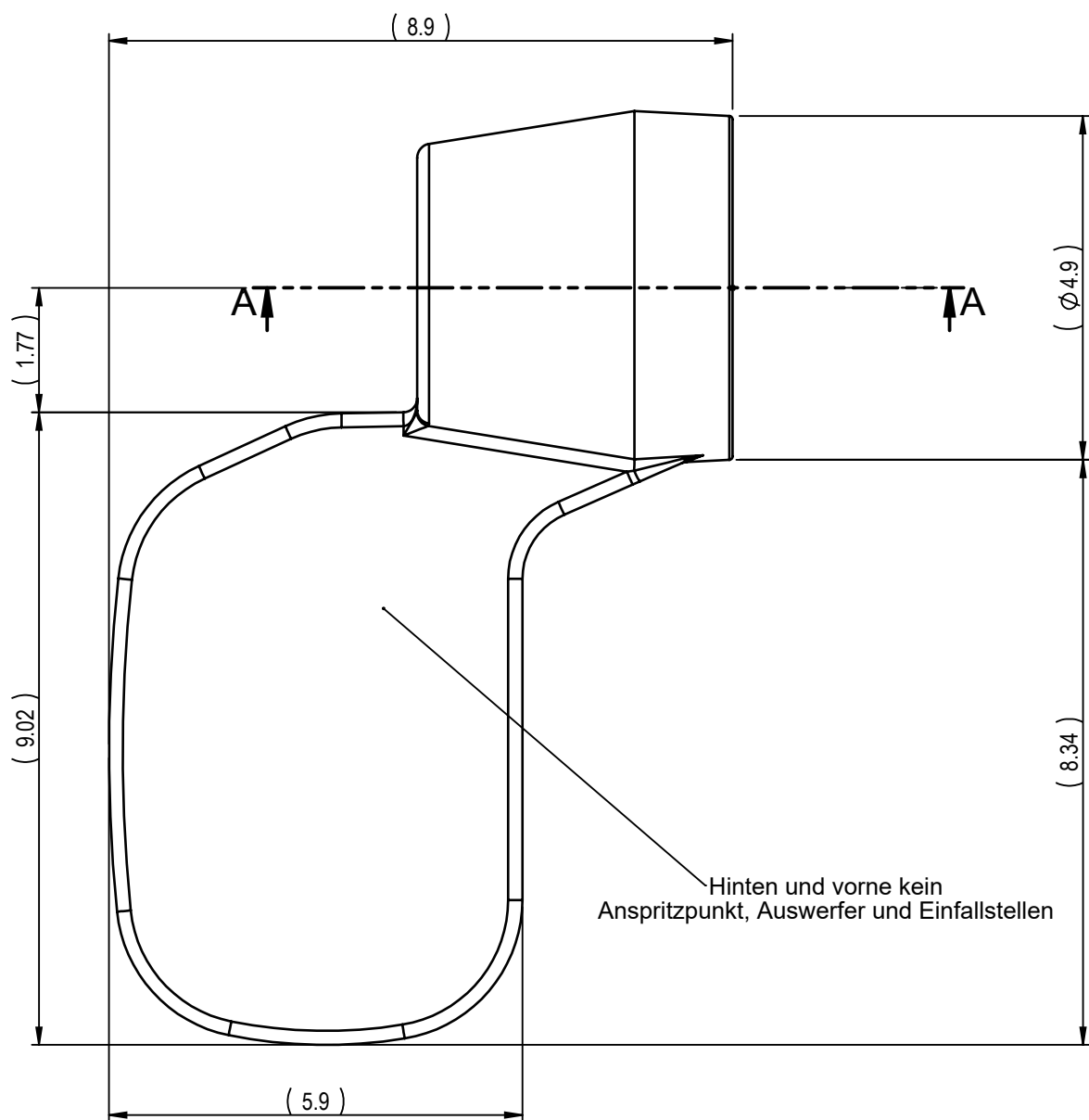


Farbe: RAL 9005 (schwarz)
Volumen / volume: 0.087 cm³
- Anspritzpunkt-Abriss nicht überstehend!
- Werkzeugkonzept absprechen mit Technischem Kontakt Ihde Dental AG



Nicht vermasste Partien durch 3D Daten definiert
Wandstärke: 0.7mm
Kanten R0.05...R0.2
Allgemeiner Anzug / general taper: 1°
Ganzes Bauteil strichpoliert
Keine Anspritzpunkte auf Sichtflächen!

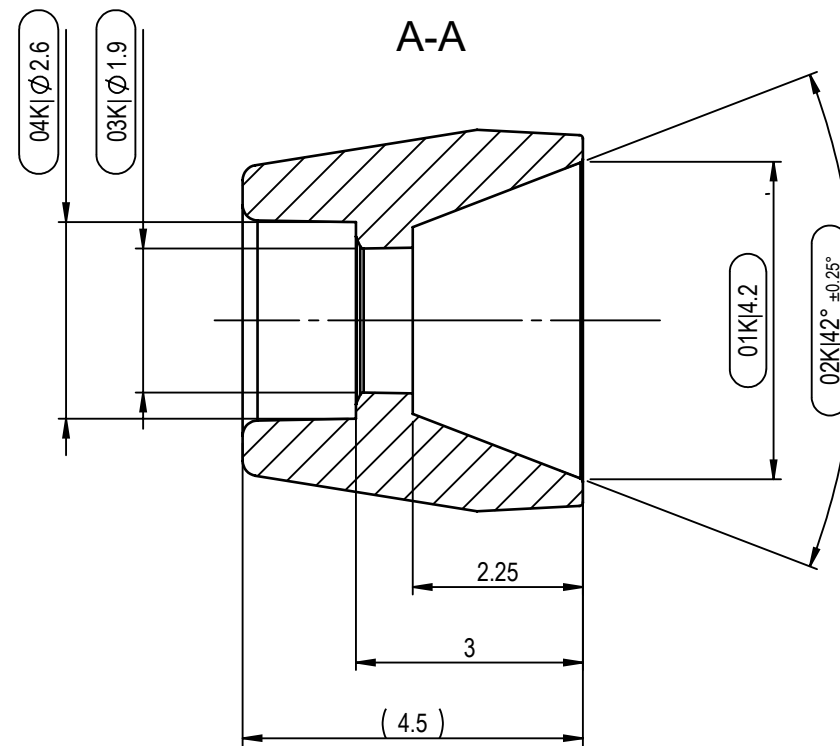14K|Dokumentationspflichtige Merkmale

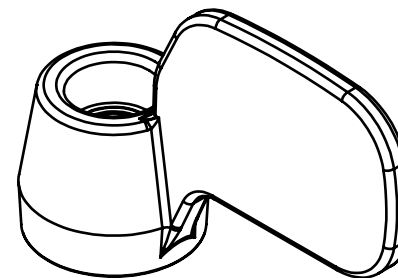

(5:1)



POS		TOLERANZEN		Material				BEMERKUNG			
1		TG 3		POM							
Änderungen	-	12.09.2018	mro	Initiale Version	Änderungen	-	-	Erstellt	03.07.2018	rko	Massstab 10:1
	-	-	-	-		Geprüft	12.09.2018	mlz			
	-	-	-	-		Freigegeben		-			
	-	-	-	-		Auftrags-Nr.					
Ohne sep. Stückliste		<input type="checkbox"/>		Projekt		Status					
Sep. Stückliste gleicher Nr.		<input type="checkbox"/>				Ursprung					
Sep. Stückliste anderer Nr.		<input type="checkbox"/>		Sach- / Artikel-Nr.		Ersatz für					
IHDE DENTAL				Benennung					Zeichnungs-Nr.		Index
Dr. Ihde Dental AG		CH-8737 Gommiswald		Scanbody MU Intraoral					462073		a

Plotdatum: 19.09.2018