



(5:1)

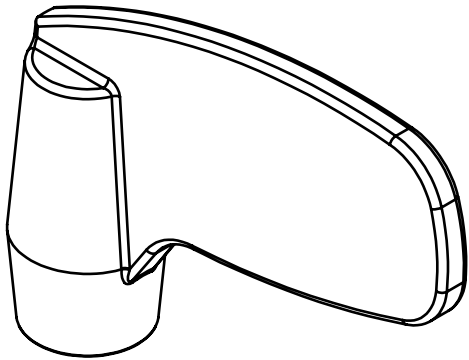

Farbe: RAL 8019 (braun)
Volumen / volume: 0.126 cm³
- Anspritzpunkt-Abriss nicht überstehend!
- Werkzeugkonzept absprechen mit Technischem Kontakt Ihde Dental AG

Nicht vermasste Partien durch 3D Daten definiert
Wandstärke: 0.7mm
Kanten R0.05...R0.2
Allgemeiner Anzug / general taper: 1°
Ganzes Bauteil strichpoliert
Keine Anspritzpunkte auf Sichtflächen!

14K|Dokumentationspflichtige Merkmale

POS		TOLERANZEN		Material				BEMERKUNG		
1		TG 3		POM						
Änderungen	-	12.09.2018	mro	Initiale Version	-	-	Erstellt	03.07.2018	mro	Massstab 10:1
	-	-			-	-	Geprüft	12.09.2018	mlz	
	-	-			-	-	Freigegeben		-	
	-	-			-	-	Auftrags-Nr.			
	Ohne sep. Stückliste		<input type="checkbox"/>	Projekt			Status			
Sep. Stückliste gleicher Nr.		<input type="checkbox"/>				Ursprung			Format A3	Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste anderer Nr.		<input type="checkbox"/>	Sach- / Artikel-Nr.			Ersatz für				
		Benennung Scanbody 4 Intraoral					Zeichnungs-Nr. 13-462071		Index a	